

Набор **ReseCare** состоит из:

Пассивный набор
арт. D400 100 011

или

Активный набор
арт. D400 100 013

HD гистероскоп, 2,9 мм, 12°
Автоклавируемый. Длина: 300 мм
арт. D300 100 004



Внешний тубус, 18,5Fr.
Двойной поток. Quick lock.
арт. D300 130 000



Внутренний тубус, 17,5Fr.
Вращающийся
арт. D300 130 001



Пассив. рабочий элемент
Совместим с моно- и би-
арт. D300 130 002



Актив. рабочий элемент
Совместим с моно- и би-
арт. D300 130 009



Режущая петля, 30°
арт. D300 140 000



Режущая петля, прямая
арт. D300 140 001



Коагуляционный электрод шарик
арт. D300 140 003



Коагуляционный электрод нож
арт. D300 140 002



Световод
Автоклавируемый, Ø: 3,5 мм, Длина: 2,3 м, с коннекторами Storz
арт. D200 150 500



Дополнительные принадлежности:

Обтуратор
Quick lock
арт. D300 130 003



Трубка для стерилизации
Автоклавируемое и хранение электродов
арт. D200 160 003



Стерилизационная корзина
Автоклавируемая. 480x250x47 мм. С крышкой и силиконовой подложкой
арт. D200 160 500



Биполярный кабель Covidien
ForceTriad
арт. D200 190 000



Биполярный кабель Erbe
VIO300D
арт. D200 190 001



imaging all the women



ReseCare


Биполярный
резектоскоп 6 мм



Уникальный резектоскоп 18,5Fr. Небольшой, но эффективный!


Инструменты малого диаметра имеют многочисленные преимущества как для хирурга, так и для пациента. С **ReseCare** ваши манипуляции точны и быстры. Отсеченные фрагменты имеют малые размеры, их присутствие не мешает вашему зрению, работать становится гораздо комфортнее.

ReseCare не травмирует ваших пациентов. Инструмент вводится без естественного сопротивления, легкое введение даже у женщин в период менопаузы или со стенозом шейки матки. В результате объем абсорбированной пациентом жидкости уменьшается.

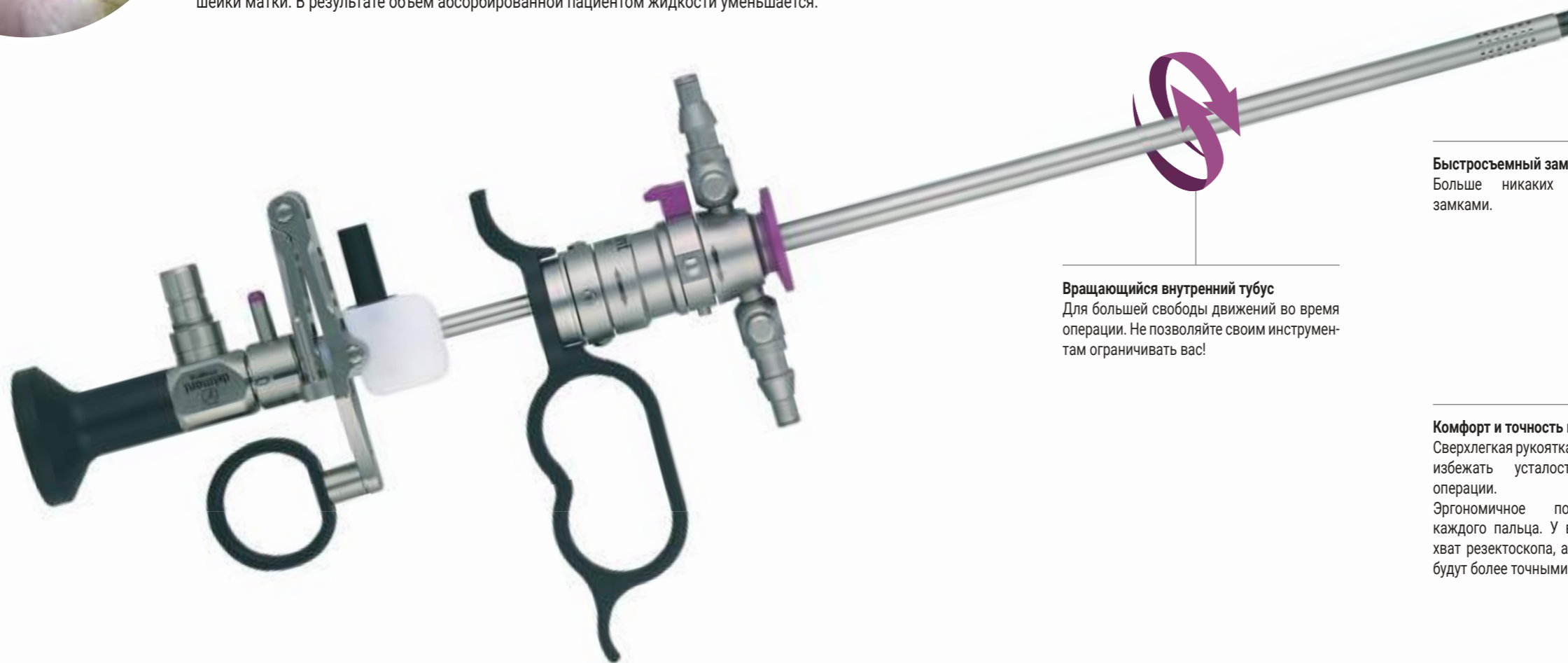

Вращающийся внутренний тубус
Для большей свободы движений во время операции. Не позволяйте своим инструментам ограничивать вас!

Качество до мелочей
Хорошее изображение также зависит от эффективной аспирации-ирригации. Черный керамический наконечник устраняет все отражения.

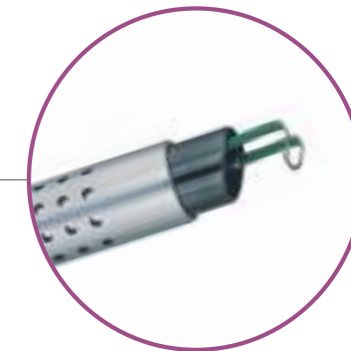

Быстросъемный замок
Больше никаких сложностей с замками.



Комфорт и точность гарантированы
Сверхлегкая рукоятка РЕЕК позволяет избежать усталости во время операции. Эргономичное положение для каждого пальца. У вас будет лучше хват резектоскопа, а ваши движения будут более точными.




Биполярная резекция

Преимущество этой, широко используемой в настоящее время, технологии имеет два аспекта, связанных с безопасностью ваших пациентов.

Во-первых, электрический ток больше не проходит через пациента, а напрямую возвращается к генератору через сам резектоскоп. Таким образом, риск ожогов из-за диффузных токов и, как следствие, появление синехий из-за поврежденного эндометрия значительно снижается.

Но также и прежде всего, монополярный резектоскоп должен использовать глицин, абсорбция которого пациентом является источником ионных нарушений, которые могут привести к смерти. Вместо глицина биполярный резектоскоп использует солевой раствор, который не токсичен и, кроме того, дешевле. **ReseCare**, подключенный к биполярному генератору, обеспечивает вам полное спокойствие. И в то же время, данный резектоскоп совместим и отлично работает со всеми монополярными генераторами.

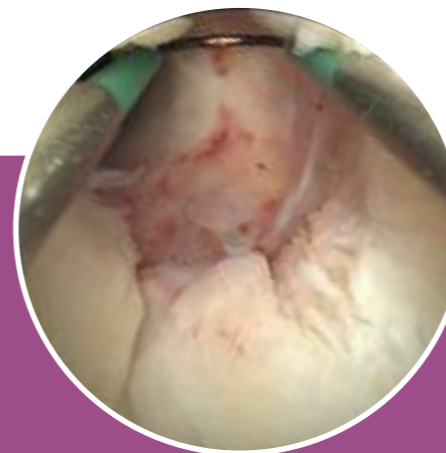

HD гистероскоп: непревзойденная производительность и выдающаяся долговечность

Наше последнее поколение линз, разработанных для получения всех преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Сверхразрешение вместе с однородным распределением света обеспечивает огромную глубину резкости. Изображение полностью будет четким! Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным, долговечным, но, в то же время, легко ремонтируемым в случае поломки.

